



magnification
Compact+ HD

User manual

Optelec

Compact⁺ HD

Manuale Utente

Versione 1.0

© 2014 Optelec, Paesi Bassi
Tutti i diritti riservati



Optelec
P.O. Box 399
2990 AJ Barendrecht
Paesi Bassi
Tel.: +31 (0)88 678 34 44
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

Contenuti

1. Introduzione	4
A proposito di questo manuale	5
Contenuto della confezione	5
2. Per iniziare	6
Usare Compact+ HD con o senza il manico	7
Pulire lo specchio	7
3. Pulsanti	8
Accensione e spegnimento	9
Regolare l'ingrandimento	9
Selezionare la modalità di visualizzazione	10
Pulsante Foto	11
4. Ricarica della batteria	12
Ricaricare Compact+ HD	12
Standby e Auto spegnimento	13
Avviso batteria	13
5. Menu di Compact+ HD	14
Attivare il menu	14
Navigare nel menu	15
Uscire dal menu	15
Menu: Informazioni	16
Menu: Immagini	16
Menu: Luminosità	18

Menu: Alimentazione	19
Menu: Audio	21
Menu: Colore	22
Menu: Reset	23
Appendice A: Sicurezza	24
Appendice B: Scheda Tecnica	25
Appendice C: Condizioni di garanzia	27
Optelec nel mondo	32

1. Introduzione

Grazie per aver scelto Optelec Compact+ HD!

Questo videoingranditore Optelec unico nel suo genere, vi permette di visualizzare e ingrandire testi e immagini stampati ad alta qualità con risoluzione HD a colori o in una delle modalità ad alto contrasto.

Con il suo design multifunzionale e il manico integrato, Compact+ HD può essere utilizzato per la lettura dei testi, la visualizzazione di immagini, la lettura di prezzi e molto altro, mentre si è a casa o in viaggio.

Se avete domande o suggerimenti riguardanti l'utilizzo di questo prodotto, contattate il Vostro distributore o la sede Optelec, consultando le informazioni nell'ultima pagina di questo manuale. Il Vostro riscontro sarà molto apprezzato.

A proposito di questo manuale

Questo manuale vi aiuterà a familiarizzare con le caratteristiche e il funzionamento di base di Compact+ HD. Si prega di leggerlo attentamente prima di utilizzare il dispositivo.

Contenuto della confezione


La confezione di Compact+ HD contiene:

- Videoingranditore Compact+ HD
- Custodia protettiva
- Alimentatore
- Panno morbido per pulire lo schermo
- Manuale utente

Se alcuni elementi fossero mancanti, contattate il Vostro distributore.

2. Per iniziare

La figura seguente mostra i principali componenti di Compact+ HD:

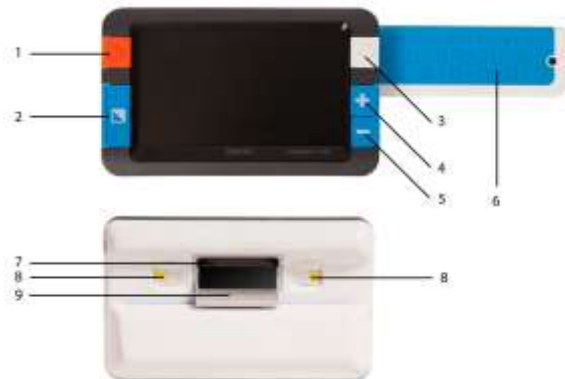

1. Pulsante On/Off
2. Pulsante modalità
3. Pulsante foto
4. Pulsante aumento ingrandimento:
5. Pulsante diminuzione ingrandimento:
6. Manico
7. Camera
8. Luci LED
9. Specchio

Compact+ HD è posto correttamente di fronte a voi con lo schermo rivolto verso l'alto e il pulsante arancione On/Off è alla sinistra dello schermo

Usare Compact+ HD con o senza il manico

Compact+ HD è ideale per visualizzare oggetti e leggere documenti in modo rapido, e ha un'impugnatura richiudibile, che da la sensazione si stia usando una lente di ingrandimento regolabile. Basta ruotare il manico in senso orario, situato sul lato inferiore, per liberarlo e farlo scattare in posizione. Il manico richiudibile fornisce supporto e controllo aggiuntivo per un comfort ottimale di lettura.



Con il manico chiuso, Compact+ HD può essere usato per visualizzare oggetti e leggere documenti più velocemente.



Con il manico aperto, posizionare Compact+ HD sull'oggetto o sul testo che desiderate visualizzare o leggere, afferrare il manico per spostare facilmente Compact+ HD sopra l'oggetto o il documento.

Pulire lo specchio

Per un'immagine di qualità ottimale si raccomanda di mantenere pulito lo specchio. Uno specchio sporco può visualizzare un'immagine non a fuoco. Per pulire lo specchio, usare il panno incluso nella confezione o altro panno morbido.

Nota: Non usare acqua o detersivi per pulire lo specchio.

3. Pulsanti

Compact+ HD ha i seguenti pulsanti:

Modalità



Premendo il pulsante Modalità sulla sinistra dello schermo, è possibile selezionare una delle modalità di visualizzazione. Premendolo per tre secondi, si spegnerà la luce sull'oggetto.

Ingrandimento



Premendo il tasto + o - alla destra dello schermo è possibile aumentare o diminuire l'ingrandimento. Premendo insieme i tasti + o - per un secondo è possibile entrare o uscire dal menu di Compact+ HD.

Pulsante foto



Il pulsante foto bianco posizionato sul lato destro dello schermo permette di scattare foto temporanee di un testo o un'immagine, per permettere di portarla più vicino agli occhi. Le immagini possono essere salvate premendo il pulsante per 2 secondi.

Pulsante On/Off

Premendo per un secondo il pulsante arancione On/Off, che si trova alla sinistra dello schermo, si accende e si spegne l'apparecchio.

La telecamera e lo specchio della telecamera di Compact+ HD sono posti sul retro dell'unità. A destra e a sinistra della telecamera ci sono due luci.

Accensione e spegnimento

Prima di accendere Compact+ HD per la prima volta, occorre caricare le batterie. Quando è carico, premere per un secondo il pulsante arancione On/Off, posizionato alla sinistra dello schermo. L'apparecchio si accenderà nella stessa modalità in cui è stato spento l'ultima volta. Per spegnere Compact+ HD, premere ancora il pulsante arancione per un secondo.

Quando si accende Compact+ HD, ci vorranno circa 3 secondi prima che l'immagine sia visualizzata sullo schermo.

Regolare l'ingrandimento

Per modificare l'ingrandimento, è sufficiente premere i tasti + o - posti sulla destra dello schermo. Premere il pulsante + per aumentare, o il pulsante - per diminuire l'ingrandimento. Il range di ingrandimento comincia da 2.8 volte e può essere aumentato fino a 11 volte.

Selezionare la modalità di visualizzazione

Premendo il pulsante Modalità sul lato sinistro dello schermo si può selezionare una delle seguenti modalità di visualizzazione:

Foto: visualizzazione fotografica di testo e immagini

Negativa: lettura ad alto contrasto bianco su nero

Positiva: lettura ad alto contrasto nero su bianco

Alto contrasto **combinazione colore 1 giallo su blu**

Alto contrasto **combinazione colore 2 giallo su nero**

La pressione del pulsante Modalità per 3 secondi, spegne o accende le lampade per l'illuminazione dell'oggetto. Cambiando la modalità di visualizzazione, le lampade verranno riattivate automaticamente.

Pulsante Foto

Il pulsante Foto permette di scattare una fotografia temporanea di un testo o di un'immagine.

- Posizionare Compact+ HD sul testo o sull'immagine che si desidera visualizzare.
- Premere il pulsante di scatto sul lato superiore destro del dispositivo per fare una foto.
- Tenere Compact+ HD vicino agli occhi per vedere oggetti o immagini più da vicino.
- Premere il pulsante modalità per cambiare modalità di visualizzazione.
- Usare i pulsanti di ingrandimento posizionati sul lato destro dello schermo per cambiare l'ingrandimento dell'immagine visualizzata in tre passi.
- Durante la visualizzazione dell'immagine catturata, premere il pulsante Foto per 2 secondi per salvare l'immagine e ritornare alla modalità dal vivo. Un breve segnale acustico e l'indicatore sullo schermo confermeranno che l'immagine è stata salvata. Un massimo di 4 immagini possono essere memorizzate nella memoria di Compact+ HD. Una nuova immagine sostituirà la più vecchia nella memoria.
- Premere nuovamente il pulsante Foto per sbloccare l'immagine. E' ora possibile fare un'altra foto.

4. Ricarica della batteria

Ricaricare Compact+ HD

Compact+ HD è fornito con un alimentatore e quattro spine. Le spine sono disponibili per UE, USA, UK e AU. Scegliete la spina adatta e montatela sull'alimentatore.

Per caricare Compact+ HD, collegate l'alimentatore alla presa DC 5V, situata sul lato sinistro dell'unità. Collegate l'altro lato dell'alimentazione alla presa di corrente. L'indicatore LED arancione accanto alla presa DC 5V rimane illuminato finché Compact+ HD è in carica. Quando l'unità è completamente carica, il LED diventa verde. Se il LED lampeggia c'è un problema di ricarica. In questo caso, scollegate l'alimentazione e riprovare.

La ricarica di Compact+ HD richiede circa 3,5 ore. A piena carica, Compact+ HD è in grado di operare per un tempo medio di tre ore, a seconda delle impostazioni per l'alimentazione. Per questioni di sicurezza, solo l'alimentatore in dotazione con Compact+ HD può essere usato per ricaricare la batteria dell'unità.

Se Compact+ HD non si accende, controllate che sia carico.

Standby e Auto spegnimento

Compact+ HD passa automaticamente in modalità di standby dopo due minuti di inattività sui tasti e sulle immagini. Premendo un qualsiasi pulsante, si riattiverà nuovamente l'unità. Quattro minuti dopo che Compact+ HD è andato in modalità standby, l'unità si spegnerà automaticamente. Premendo il pulsante arancione sul lato sinistro dell'unità si riaccenderà. Il tempo di standby e di spegnimento può essere modificato e disattivato nel menu di Compact+ HD. Consultate il capitolo successivo per modificare queste impostazioni.

Avviso batteria

Quando la carica della batteria è inferiore al 5% della sua capacità totale, ogni minuto verrà emesso un segnale acustico e verrà mostrata l'icona della batteria scarica per 2 secondi. In tal caso, assicurarsi di caricare l'unità il più presto possibile. Quando la batteria è scarica, l'unità si spegnerà automaticamente.



Se Compact+ HD non si accende, assicurarsi che la batteria sia carica.

5. Menu di Compact+ HD

Mostra lo stato della batteria e la versione del firmware



Consente di visualizzare o eliminare le immagini scattate



Consente di regolare la luminosità dello schermo.



Consente di configurare le impostazioni di alimentazione.



Consente di attivare/disattivare l'audio.



Consente di cambiare i colori delle 4 modalità ad alto contrasto.



Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.



Attivare il menu



Per accedere al menu, premere i tasti + e - contemporaneamente per un secondo.

Navigare nel menu



Utilizzare i tasti + o - per spostarsi tra le voci del menu. Il pulsante Modalità situate a sinistra dello schermo, attiva la voce di menu selezionata o conferma la selezione. Per modificare una selezione, utilizzare i tasti + o -. Per tornare indietro nel menu, premere il tasto foto.



Uscire dal menu



Per uscire dal menu, premere i tasti + e - contemporaneamente per un secondo.

Menu: Informazioni



Questo menu mostra lo stato della batteria e la versione del firmware del dispositivo. In questo menu non è possibile apportare alcuna modifica.

- Attivare il menu premendo i tasti **+** e **-** contemporaneamente per un secondo.
- Utilizzare il tasto **+** per spostarsi in alto e il tasto **-** per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione di menu informazioni e attivare questo menu premendo il pulsante Modalità.
- Per uscire dal menu, premere i tasti **+** e **-** simultaneamente per un secondo o premere il tasto foto per tornare al menu precedente.

Menu: Immagini




Questo menu contiene due sottomenu:

- Visualizza: Per visualizzare immagini salvate
- Cancella: Per cancellare immagini

Sottomenu Visualizza:

Per visualizzare le immagini catturate:

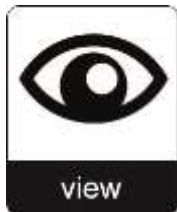

- Attivare il menu premendo i tasti + e - simultaneamente per un secondo
- Utilizzare il tasto + per spostarsi in alto e il tasto - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione di menu Immagini e attivare questo menu premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare l'opzione Visualizza usando i tasti + e - per scorrere le opzioni. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Selezionare l'immagine che vorresti visualizzare usando il tasto + per andare all'immagine seguente, o il tasto - per andare all'immagine precedente. Premere il pulsante Modalità per selezionare l'immagine.

Utilizzare i tasti + e - per aumentare l'ingrandimento. Premere il pulsante Modalità per cambiare i colori.

Sottomenu Cancella

Per cancellare le immagini catturate:



- Attivare il menu premendo i tasti + e - simultaneamente per un secondo.
- Utilizzare il tasto + per spostarsi in alto e il tasto - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione di menu Immagini e attivare questo menu premendo il pulsante Modalità.

- Selezionare l'opzione cancella usando i tasti + e - per scorrere le opzioni. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Selezionare l'immagine che vorresti cancellare usando il tasto + per andare all'immagine seguente, o il tasto - per andare all'immagine precedente. Premere il pulsante Modalità per cancellare l'immagine.
- Premere i tasti + e - per uscire dal menu, o premere il tasto foto per tornare al menu precedente

Menu: Luminosità



Questo menu consente di regolare la luminosità del display.

- Attivare il menu premendo i tasti + e - contemporaneamente per un secondo.
- Utilizzare il tasto + per spostarsi in alto e il tasto - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione Luminosità e attivarla premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare il livello di luminosità utilizzando il pulsante + per aumentarla e il pulsante - per diminuirla. Ci sono 5 livelli di luminosità tra cui scegliere. Il livello di luminosità di default è 5.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Premere i tasti + e - per uscire dal menu, o premere il tasto foto per tornare al menu precedente.

Menu: Alimentazione



Questo menu contiene due sottomenu: Spegnimento e Standby.

Sottomenu Spegnimento



Imposta il tempo prima che Compact+ HD si spenga automaticamente. Di default, il tempo di spegnimento è impostato a 4 minuti. Questi 4 minuti decorrono dal tempo di standby di 2 minuti. Di default, l'unità si spegne automaticamente dopo 6 minuti.

Per regolare il tempo di spegnimento di Compact+ HD:

- Attivare il menu premendo contemporaneamente i tasti + e – per un secondo.
- Utilizzare il tasto + per spostarsi in alto e il tasto – per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione Alimentazione e attivarla premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare l'opzione Spegnimento utilizzando i tasti + e – per spostarsi in basso all'interno del menu. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.

- Selezionare il tempo prima che l'unità si spenga utilizzando il tasto + per aumentare e il tasto - per diminuire il tempo. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Selezionando DISABILITA si disabilita la funzione di spegnimento automatico.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Premere i tasti + e - per uscire dal menu, o premere il tasto foto per tornare al menu precedente.

Sottomenu Standby



Imposta il tempo prima che Compact+ HD entri in modalità standby per risparmiare energia. Premendo un qualsiasi pulsante si riattiverà l'unità. Di default, il tempo di standby è impostato a 2 minuti.

Per regolare il tempo di standby di Compact+ HD:

- Attivare il menu premendo contemporaneamente i tasti + e - per un secondo.
- Utilizzare il tasto + per spostarsi in alto e il tasto - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione Alimentazione e attivarla premendo il pulsante Modalità.

- Selezionare l'opzione Standby utilizzando i tasti + e – per scorrere le opzioni. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Selezionare il tempo prima che l'unità vada in standby utilizzando il tasto + per aumentare e il tasto – per diminuire il tempo. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Selezionando DISABILITA si disabilita la funzione di standby automatico.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Premere i tasti + e – per uscire dal menu, o premere il tasto foto per tornare al menu precedente.

Menu: Audio



Questo menu consente di attivare o disattivare i segnali acustici (segnali di feedback). Di default, i segnali acustici sono abilitati.

- Attivare il menu by premendo i tasti + e – contemporaneamente per un secondo.
- Utilizzare il tasto + per spostarsi in alto e il tasto – per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare il menu Audio ed attivarlo premendo il pulsante Modalità.
- Per attivare i suoni, selezionare il valore ON utilizzando i tasti + e –. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.

- Selezionando OFF si disabiliterà l'audio.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Premere i tasti + e - per uscire dal menu, o premere il tasto foto per tornare al menu precedente.

Menu: Colore




Compact+ HD supporta quattro modalità ad alto contrasto. Per ognuna di esse, i colori in primo piano e i colori di sfondo possono essere selezionati. Tre delle modalità ad alto contrasto possono essere disabilitate se è richiesta solo una modalità ad alto contrasto.

- Attivare il menu premendo i tasti + e - contemporaneamente.
- Utilizzare il tasto + per spostarsi in alto e il tasto - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare il menu Colore e attivarlo premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare la modalità ad alto contrasto con il tasto + per spostarsi in alto e con il tasto - per spostarsi in basso nel sottomenu Colore. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Per selezionare un nuovo colore di contrasto elevato per il primo piano e lo sfondo, usare il tasto + per spostarsi in alto e il tasto - per spostarsi in basso nella lista delle combinazioni di colore. Selezionate una combinazione di colori premendo il pulsante Modalità.

- Le modalità ad alto contrasto 2, 3 e 4 possono essere disattivate selezionando il valore DISABILITA.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Premere i tasti + e - per uscire dal menu, o premere il tasto foto per tornare al menu precedente.

Menu: Reset

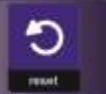

In Compact+ HD possono essere ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica. Tutte le impostazioni che sono state modificate, saranno ripristinate alle impostazioni di fabbrica.

- Attivare il menu premendo i tasti + e - contemporaneamente per un secondo.
- Utilizzare il tasto + per spostarsi in alto e il tasto - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare il menu Reset e attivarlo premendo il pulsante Modalità.
- Per ripristinare le impostazioni di fabbrica selezionare SI utilizzando i pulsanti + e -. Scegliendo NO si lasceranno tutte le impostazioni invariate.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Premere i tasti + e - per uscire dal menu, o premere il tasto foto per tornare al menu precedente.

Appendice A: Sicurezza

- Non esporre Compact+ HD a calore eccessivo o alla luce diretta del sole per evitare il rischio di incendio.
- Non smontare le parti di Compact+ HD. Contattare un distributore Optelec autorizzato, nella vostra zona.
- Per evitare il rischio di danni elettrici, tenere Compact+ HD lontano da liquidi e prodotti chimici.
- Maneggiare Compact+ HD con cura per evitare danni ai componenti interni.
- Non utilizzare Compact+ HD vicino a dispositivi medici non adeguatamente schermati.
- Non tentare di aprire il vano batterie o tentare di rimuovere la batteria.
- Rivolgersi al propriorivenditore per riparare l'apparecchiatura se necessario. **Non aprire l'unità** in quanto ciò farebbe decadere la garanzia.
- Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo. Usare un panno morbido inumidito per pulire l'esterno. Non utilizzare detergenti o materiali abrasivi che potrebbero danneggiarlo.

L'utilizzo di Compact+ HD in modo non aderente a quanto descritto in questo manual, farà decadere la garanzia.

Appendice B: Scheda Tecnica

Ingrandimento	3 – 10 volte
Modalità di visualizzazione	A colori modalità fotografica Alto contrasto bianco su nero Alto contrasto nero su bianco Alto contrasto a colori combinazione 1 Alto contrasto a colori combinazione 2
Rapporto alto contrasto	500:1
Luminosità schermo	350 cd/m ²
Dimensione schermo	4.3" TFT
Risoluzione schermo	480 x 272
Dimensioni	130 x 80 x 33 mm / 5.1 x 3.1 x 1.3 pollici
Batteria	durata media 3 ore in uso continuo 3 ore per la ricarica
Batteria Li-ion	ricaricabile, 3.7V 1400mAh
Peso	250 grammi
Alimentatore	5 V / 1.5A
Alimentazione in entrata	100-240V, 50-60Hz, 0.3A
Alimentazione in uscita	DC5V-1.5A
Frequenza	50-60 Hz

Condizioni di utilizzo

Temperatura	+10°C to 35°C / 50°F to 95°F
Umidità	< 70%, no condensa
Altitudine	fino a 3000 m (9842 feet)
Pressione	700 – 1060 hPa

Condizioni per stoccaggio e trasporto

Temperatura	+0°C to 40°C / 32°F to 104°F
Umidità	< 95%, no condensa

Appendice C: Condizioni di garanzia

Optelec garantisce che Compact+ HD, con decorrenza dalla data di consegna, è esente da difetti di materiale e di fabbricazione.

La garanzia non è trasferibile e non si applica a gruppi, utenti multipli e agenzie. Compact+ HD è stato progettato per l'utente singolo, per essere utilizzato in ambienti chiusi o all'aperto. Optelec si riserva il diritto di riparare o sostituire qualsiasi Compact+ HD acquistato con un prodotto simile o migliore.

In nessun caso Optelec o i suoi fornitori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni indiretti o consequenziali. Le eventuali azioni risolutive si limiteranno alla sostituzione di Compact+ HD. Questa garanzia è da ritenersi valida solo se applicate nel paese di acquisto, e a condizione che i sigilli siano intatti. Per ulteriori diritti di garanzia o di assistenza durante o dopo il periodo di garanzia, si prega di contattare il proprio distributore Optelec.

Optelec non si assume alcuna responsabilità per un utilizzo di questo dispositivo diverso da quello descritto nel manuale. L'utilizzo di Compact+ HD in modo non aderente a quanto descritto in questo manuale, farà decadere la garanzia.

Direttiva WEEE

La Direttiva sullo Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), entrata in vigore come legge Europea il 13 Febbraio 2003, ha portato ad una svolta nel trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro vita utile.



Lo scopo di questa Direttiva è, come prima priorità, la prevenzione di WEEE, e in aggiunta, promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero di questi rifiuti in modo da ridurre lo smaltimento.

IL Logo WEEE (mostrato a sinistra) sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici.

L'utente è responsabile di smaltire tutti i rifiuti elettrici ed elettronici rivolgendosi ad un punto di raccolta per lo smaltimento di questi rifiuti pericolosi. La raccolta differenziata e il corretto recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici all'atto dello smaltimento consentirà di conservare le risorse naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici garantisce la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'eventuale recupero e i punti di raccolta, contattare il punto raccolta cittadino, il servizio smaltimento rifiuti, il negozio dove l'apparecchio è stato acquistato, o il produttore del dispositivo.

Direttiva RoHS

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e loro modifiche.

Direttiva Comunità Europea

I prodotti con marchio CE sono conformi alla Direttiva EMC (2004/108/EC), e alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/EC) emessa dalla Commissione della Comunità Europea.

La conformità a queste direttive implica la conformità alle seguenti norme internazionali:

EMC

EN 50081-1

EN 55022

EN 55024

C-Tick

CISPR 22

Safety

UL 60950

FCC

FCC part 15 Class B

ATTENZIONE: L'uso di accessori, trasduttori e cavi, con l'eccezione di trasduttori e cavi venduti dal produttore di Compact+ HD come parti di ricambio per i componenti, possono causare aumento o riduzione dell'immunità di Compact+ HD.



Questo dispositivo ha marchio CE e FCC

Comunicato della Commissione Comunicazioni Federali (FCC):

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono indicati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose nelle installazioni residenziali.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo apparecchio causasse interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, che possono essere

determinate accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV.

ATTENZIONE:

Si avvisa che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare il permesso di usare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero compromettere il funzionamento.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non idoneo. Si prega di smaltire le batterie usate secondo le norme di smaltimento e riciclaggio che sono in vigore nel proprio paese o regione!

Optelec nel mondo**Optelec U.S. Ltd**

3030 Enterprise Court, Ste C
Vista, CA 92081

U.S.A.

T: +1 (800) 826-4200

www.optelec.com

Optelec Canada

1832 Marie-Victorin
Longueuil, QC J4G 1Y9

Canada

T: +1 (450) 677-1171

www.optelec.com

Optelec Nederland BV

Breslau 4
2993 LT Barendrecht

The Netherlands

T: +31 (0)88 678 3555

www.optelec.nl

Optelec Limited

2 Millfield House
Woodshots Meadow
Croxley Business Park
Watford WD18 8YX

United Kingdom

T: +44 1923 23 13 13

www.optelec.co.uk

Optelec NV

Baron Ruzettelaan 29
8310 Brugge

Belgium

T: +32 (0)50 35 75 55

www.optelec.be

Optelec GmbH

Fritzlarer Strasse 25
34613 Schwalmstadt

Germany

T: +49 669 196 170

www.optelec.de

Optelec Corporate Headquarters

Breslau 4 – 2993 LT Barendrecht – The Netherlands –

T: +31 (0)88 678 3444 – www.optelec.com

The logo for Optelec features the word "Optelec" in a dark blue, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a blue arc above it and another blue arc below it. The background consists of several overlapping, semi-transparent light blue curved shapes that create a sense of depth and movement.

Optelec

www.optelec.com