



Magnification

Compact 6 HD

User manual



Compact 6 HD

Compact 6 HD Speech

Manuale Utente

Versione 1.1

© 2017 Optelec, the Netherlands

Tutti i diritti riservati



Optelec
P.O. Box 399
2990 AJ Barendrecht
The Netherlands

Tel: +31 (0)88 678 34 44
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. INTRODUZIONE.....	6
INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE	6
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	7
2. INIZIAMO.....	8
USO DEL COMPACT 6 HD CON LO STATIVO DI LETTURA	9
PULIRE LA TELECAMERA	12
PULSANTI.....	13
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.....	14
STAND-BY E RIATTIVAZIONE	14
REGOLAZIONE DELL'INGRANDIMENTO.....	15
SELEZIONARE UNA MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE.....	15
DATA E ORA	16
LE TELECAMERE PANORAMICA E DI LETTURA.....	17
USARE IL PULSANTE DI ACQUISIZIONE	18
3. USO DELLE FUNZIONI SINTESI VOCALE E OCR DI COMPACT 6 HD.....	19
4. RICARICA DELLA BATTERIA	21
AVVISO SULLA BATTERIA.....	22
STANDBY	22
5. IL MENU DI COMPACT 6 HD	23
APRIRE E CHIUDERE IL MENU.....	23
MENU PRINCIPALE.....	24
Stato della batteria.....	24
Regolazione della luminosità	25

Salva.....	25
Apri	25
Voci.....	27
Velocità della voce	28
IMPOSTAZIONI.....	29
Righe attivato / disattivato.....	30
Bluetooth: collegare un altoparlante o delle cuffie Bluetooth	30
Colori	32
ALTRO.....	33
Luce lettura	34
Luce estesa	34
Disattiva audio	34
Vibrazione.....	34
Alterna telecamere.....	34
Posizione riga	35
Standby	35
Barra pulsanti.....	35
Stativo chiuso	36
Ripristina.....	36
APPENDICE A: INFORMAZIONI TECNICHE.....	37
APPENDICE B: SICUREZZA.....	39
APPENDICE C: GARANZIA	40

Direttiva WEEE

La Direttiva sullo Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), entrata in vigore come legge Europea il 13 Febbraio 2003, ha portato ad una svolta nel trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro vita utile.

Lo scopo di questa Direttiva è, come prima priorità, la prevenzione di WEEE, e in aggiunta, promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero di questi rifiuti in modo da ridurre lo smaltimento.



Il Logo WEEE (mostrato a sinistra) sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. L'utente è responsabile di smaltire tutti i rifiuti elettrici ed elettronici rivolgendosi ad un punto di raccolta per lo smaltimento di questi rifiuti pericolosi. La raccolta differenziata e il corretto recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici all'atto dello smaltimento consentirà di conservare le risorse naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici garantisce la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'eventuale recupero e i punti di raccolta, contattare il punto raccolta cittadino, il servizio smaltimento rifiuti, il negozio dove l'apparecchio è stato acquistato, o il produttore del dispositivo.

1. Introduzione

Complimenti per aver scelto Compact 6 HD/Compact 6 HD Speech!

L'esclusivo videoingranditore con touch screen da 6 pollici consente di visualizzare e di ingrandire testi ed immagini in qualità HD a colori reali o usando colori a contrasto elevato. Con il suo schermo da 6 pollici, le due telecamere, l'interfaccia touch screen personalizzabile ed i suoi accessori esclusivi, sarà possibile personalizzare Compact 6 HD per soddisfare le proprie necessità.

Se avete domande o suggerimenti sull'uso di questo prodotto, contattate il vostro distributore o Optelec usando le informazioni reperibili sull'ultima pagina di questo manuale. Il vostro feedback è il benvenuto, ci auguriamo che Compact 6 HD sia di vostro gradimento!

Informazioni su questo manuale

In Optelec ogni prodotto è soggetto a migliorie ed aggiornamenti. Pertanto è possibile che questo manuale non corrisponda all'ultima versione del prodotto. È sempre possibile scaricare il manuale aggiornato dal sito www.optelec.com nella sezione Supporto.

Nota: i termini "swipe" e "tap", sono stati sostituiti rispettivamente da "scorrere con il dito" e "toccare".

Questo manuale vi aiuterà a familiarizzare con le funzioni e le operazioni di base di Compact 6 HD/Compact 6 HD Speech. Leggete questo manuale con attenzione prima di usare il dispositivo. A meno che non sia indicato diversamente, tutti i riferimenti per Compact 6 HD valgono anche per Compact 6 HD Speech. Le funzioni specifiche per Compact 6 HD Speech sono contrassegnate dal logo Speech.



Logo Speech

Contenuto della confezione

La confezione di Compact 6 HD comprende:

- Videingranditore Compact 6 HD/Compact 6 HD Speech e stativo di lettura
- Borsa di trasporto
- Laccetto
- Alimentatore USB con cavo USB-C
- Adattatori specifici per 4 paesi (EU, US, UK, e AU)
- Panno per la pulizia dello schermo
- Questo manuale utente

Se mancasse uno di questi componenti, contattate il vostro distributore.

2. Iniziamo

Compact 6 HD è posizionato correttamente quando lo schermo è rivolto verso l'alto, il pulsante di acquisizione bianco ed il tasto On/Off arancione sono agli angoli superiori dello schermo.



Uso del Compact 6 HD con lo stativo di lettura

Compact 6 HD viene consegnato con uno stativo di lettura a parte. Quando Compact 6 HD viene posizionato sullo stativo può essere usato con quest'ultimo chiuso o aperto.



Compact 6 HD aperto



Compact 6 HD chiuso


In posizione **aperta** lo schermo ha una certa inclinazione per la lettura, e sarà attivata la relativa telecamera per la lettura. La posizione aperta facilita la lettura di testi lunghi. La barra dei pulsanti avrà uno sfondo blu scuro.

In posizione **chiusa** sarà usata la telecamera panoramica. Tenete in mano l'apparecchio e puntate la telecamera (che si trova sul retro) verso l'oggetto o il testo che volete vedere o leggere. La

posizione chiusa è ideale per scansionare e visualizzare oggetti o documenti rapidamente. Se è attiva la telecamera panoramica, la barra dei pulsanti sarà arancione.


Per **inserire** Compact 6 HD nello stativo di lettura, seguite queste indicazioni:

1. Inserite Compact 6 HD nella parte inferiore dello stativo di lettura.
2. Inclinate Compact 6 HD verso lo stativo.
3. Compact 6 HD adesso sarà bloccato nello stativo di lettura.

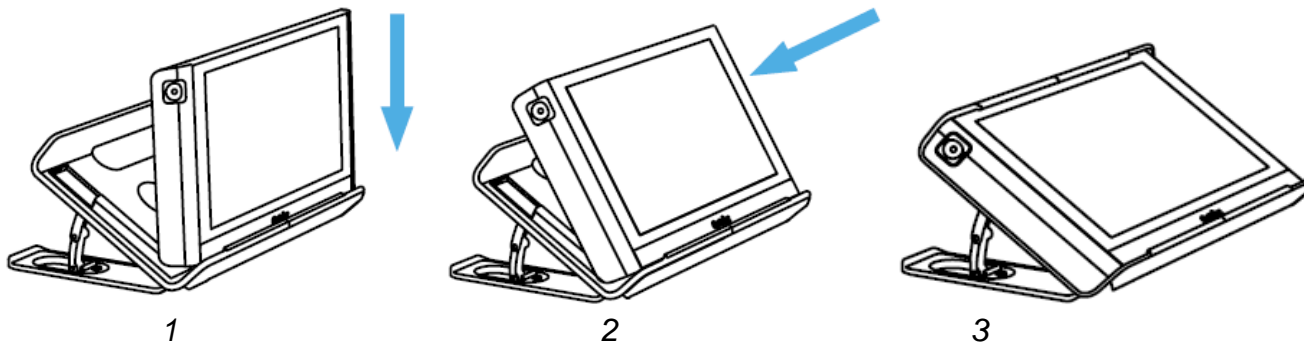

Per **rimuovere** Compact 6 HD dallo stativo, seguite queste indicazioni:

1. Aprite lo stativo.
2. Posizionate 2 dita nei rientri sul retro.
3. Premete delicatamente per rimuovere Compact 6 HD dallo stativo.

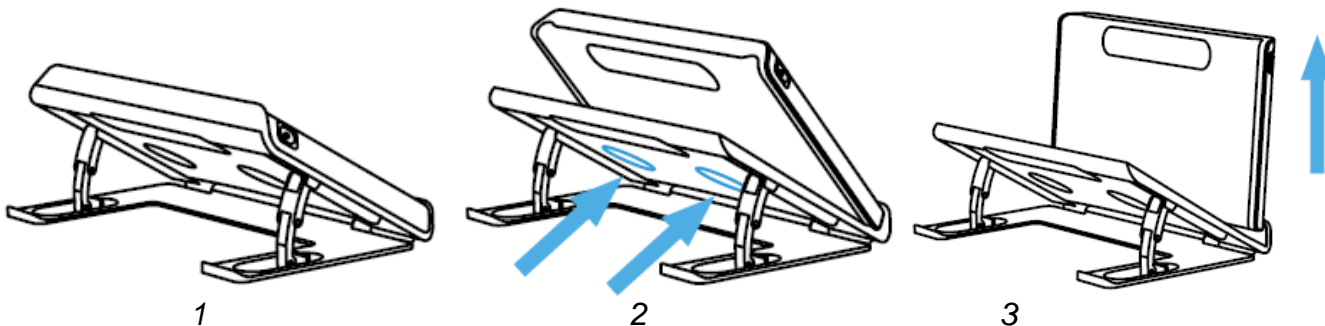

Per **aprire** lo stativo, fate quanto segue:

1. Posizionate Compact 6 HD davanti a voi affinché lo schermo sia rivolto verso l'alto, con il pulsante di acquisizione bianco ed il tasto ON/OFF negli angoli superiori dello schermo.
2. Aprite le leve dello stativo, Compact 6 HD si accenderà automaticamente.

Per **chiudere** lo stativo, fate quanto segue:

1. Posizionate Compact 6 HD davanti a voi affinché lo schermo sia rivolto verso l'alto, con il pulsante di acquisizione bianco ed il tasto ON/OFF negli angoli superiori dello schermo.
2. Spingete delicatamente Compact 6 HD verso il basso per chiudere lo stativo.

Pulire la telecamera

Per ottenere la miglior qualità dell'immagine, assicuratevi che le lenti della telecamera e delle varie luci siano pulite. Una telecamera sporca causa immagini sfocate e può far sì che la telecamera abbia una messa a fuoco scorretta. Per la pulizia, usate il panno in dotazione o un altro panno morbido usato per la pulizia delle lenti.

Nota: non usate acqua o altre soluzioni per pulire la telecamera.



Pulsanti

Compact 6 HD ha i seguenti pulsanti:

Tasto On / Off



Una breve pressione del pulsante arancione, posizionato in alto a sinistra, metterà Compact 6 HD in modalità stand-by o riattiverà l'apparecchio. Se premete il tasto per 3 secondi spegnerete o accenderete l'unità.

Tasto Acquisizione



Il pulsante Acquisizione, posizionato in alto a destra, consentirà di acquisire un'immagine temporanea di un testo o di una figura ad una certa distanza, permettendovi in seguito di avvicinarla a voi. Se siete in possesso di un Compact 6 HD Speech, il dispositivo estrapolerà il testo e lo leggerà con la sintesi vocale.

Connettore USB



Il connettore USB bianco si trova sul lato destro nell'angolo inferiore del Compact 6 HD. Il cavo USB in dotazione si collegherà alla porta USB dell'apparecchio ed all'alimentatore. Per mettere in carica Compact 6 HD, usate solo l'alimentatore fornito. Usate il convertitore da USB a jack audio da 3.5 mm per collegare delle cuffie o degli altoparlanti.

Telecamere



Le telecamere di Compact 6 HD si trovano sul retro dell'unità.

Accensione e spegnimento

Per accendere Compact 6 HD la prima volta, l'unità deve essere completamente caricata. A carica completata, premete l'interruttore che si trova nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per tre secondi. Per spegnere Compact 6 HD, premete il pulsante arancione di nuovo per tre secondi. Quando accendete Compact 6 HD passeranno 25 secondi circa prima che appaia l'immagine a schermo.

Stand-by e riattivazione

Quando viene acceso Compact 6 HD, una breve pressione del pulsante di accensione (arancione) metterà l'apparecchio in stand-by. Se premete nuovamente il tasto arancione Compact 6 ripartirà dalla modalità in cui era prima dello stand-by. Quando riattivate l'unità, Compact 6 HD impiegherà circa 1 secondo prima che appaia l'immagine a schermo.

Quando Compact 6 HD è in modalità stand-by, l'unità può essere riattivata anche aprendo lo stativo di lettura. Chiudendo lo stativo, invece, Compact 6 HD ritornerà in stand-by.

Se premete il pulsante di acquisizione mentre Compact 6 HD è in modalità stand-by apparirà l'ora.

Regolazione dell'ingrandimento

Per cambiare l'ingrandimento è sufficiente toccare lo schermo. Nella parte inferiore, o sul lato destro, in base alla posizione scelta, apparirà la barra dei pulsanti. La posizione della barra dei pulsanti può essere selezionata da menu. Consultate il capitolo 5 per maggiori informazioni su come cambiare la posizione. Nella barra dei pulsanti toccate sul pulsante + per aumentare o sul pulsante - per diminuire l'ingrandimento. Toccate di nuovo lo schermo per nascondere la barra dei pulsanti. La barra dei pulsanti sparirà automaticamente se lo schermo non ha nessun input per 10 secondi.



Selezionare una modalità di visualizzazione

Tramite il pulsante Modalità, in mezzo alla barra dei pulsanti, sarà possibile selezionare una delle modalità di visualizzazione seguenti:

Modalità fotografica: visualizzazione di testi e foto a colori reali

Modalità Negativa: lettura a contrasto elevato, bianco su nero

Modalità Positiva: lettura a contrasto elevato, nero su bianco


Combinazione colori 1 a contrasto elevato

Combinazione colori 2 a contrasto elevato


Nota: le modalità a contrasto elevato non sono disponibili nelle acquisizioni fatte con la telecamera panoramica.

Data e ora

Per aprire l'orologio, scorrete con il dito dal bordo destro dello schermo verso sinistra. In alternativa, toccate lo schermo e successivamente la freccia sul bordo destro dello schermo. I colori dell'orologio corrisponderanno a come è stato impostato il primo colore a contrasto elevato.

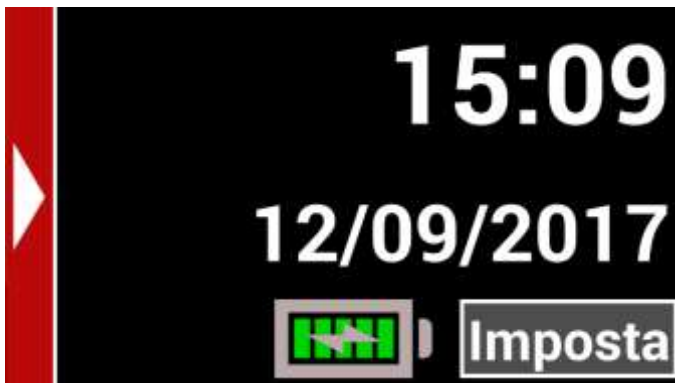

Orologio

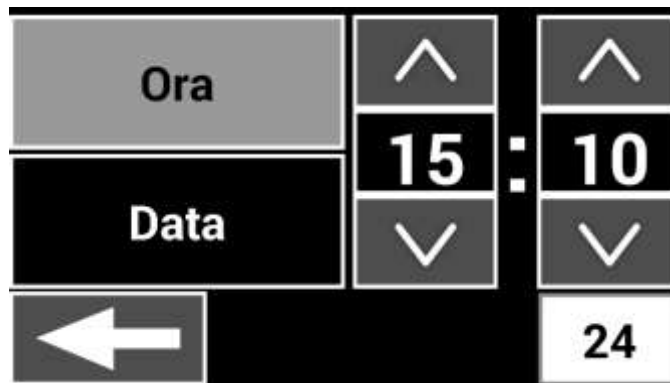

Impostazione ora

Toccate l'icona della batteria per avere l'icona e lo stato della batteria ingranditi. Usate la “Freccia Indietro” per ritornare all'orologio.

Per impostare la data e l'ora, selezionate il pulsante Impostazioni. Per cambiare un valore, toccate sul campo che volete cambiare e poi sulla freccia su o giù per modificarne il valore. Toccate sulla freccia Indietro per uscire dalla schermata delle impostazioni di data e ora.

Le telecamere panoramica e di lettura

Compact 6 HD è dotato di due telecamere, una telecamera per la lettura e la telecamera panoramica.



L'apertura dello stativo comporterà l'accensione di Compact 6 HD, e verrà automaticamente selezionata la telecamera per la lettura. Quando accendete Compact 6 HD a stativo chiuso, sarà attivata la telecamera panoramica. La telecamera per la lettura è ottimizzata per leggere del testo sfruttando lo stativo mentre la telecamera panoramica è ottimizzata per puntare gli oggetti vicini. Per passare da una telecamera all'altra, scorrete verso il basso con il dito partendo dal bordo superiore dello schermo. In alternativa, toccate lo schermo e successivamente la freccia nella parte superiore della schermata.

Usare il pulsante di acquisizione

Il pulsante di acquisizione consente di catturare un'immagine provvisoria di un testo o di una figura.

1. Tenete o posizionate Compact 6 HD sopra il testo o l'immagine che volete acquisire.
2. Premete il pulsante Acquisizione posizionato in alto a destra dell'apparecchio per acquisire l'oggetto.
3. Se avvicinate Compact 6 HD potrete visualizzare l'oggetto o il testo più minuziosamente.
4. Premete ancora il pulsante Acquisizione per ritornare in modalità video live. In questo modo sarà possibile riacquisire un oggetto.

Per salvare o eliminare le acquisizioni fatte, consultate il capitolo 5.



3. Uso delle funzioni Sintesi vocale e OCR di Compact 6 HD

Se siete in possesso di Compact 6 HD Speech, l'acquisizione di un oggetto attiva le funzioni di sintesi vocale. Compact 6 HD Speech estrapolerà il testo dall'immagine e lo leggerà tramite sintesi.

Attivazione della sintesi

Per acquisire un'immagine ed attivare la sintesi:

- Inquadrate il testo o parte di esso nella visualizzazione telecamera e premete il pulsante di Acquisizione. Per ottenere i risultati migliori, assicuratevi che ci sia luce a sufficienza nel locale, evitate zone d'ombra e limitatevi al testo del documento che volete effettivamente leggere. Se il testo nella visualizzazione è troppo piccolo, il riconoscimento perderà in precisione e potrebbe non riuscire.
- Toccate lo schermo e successivamente il pulsante “Play” nella barra dei pulsanti affinché Compact 6 HD Speech legga il testo acquisito. Nel caso in cui l'elaborazione del testo sia ancora in corso, apparirà una barra di progressione. Compact 6 HD Speech avvierà la lettura una volta terminata la procedura di riconoscimento.
- Usate il pulsante Play/Pausa per avviare o interrompere la lettura.

- Toccate e tenete premuto (pressione prolungata) sul testo per avviare la lettura a partire dalla parola o dalla Sezione di testo su cui puntate
- Toccate sul pulsante “Modalità” per visualizzare il testo con i colori a contrasto elevato. Il testo sarà formattato come colonna per adattarsi alla larghezza dello schermo. In visualizzazione a contrasto elevato, le immagini non verranno mostrate. Premete il pulsante “Modalità” per passare tra le varie opzioni a contrasto elevato e a colori reali. In modalità a colori reali le immagini saranno mostrate, così come l'aspetto originale del testo.
- Se non viene trovato nessun testo, premendo il pulsante "Play" apparirà il messaggio “Nessun testo trovato”.
- Per cambiare lingua e voce consultate il capitolo 5.

Regolazione del volume

Troverete lo slider del “Volume” al fianco del pulsante “Play”. Lo slider “Volume” è presente solo in visualizzazione Acquisizione.




4. Ricarica della batteria

Compact 6 HD viene consegnato con un alimentatore e quattro adattatori di corrente specifici per quattro paesi: EU, US, UK, ed AU. Scegliete l'adattatore corrispondente al vostro paese ed inseritelo nell'alimentatore.

Per mettere in carica Compact 6 HD, collegate il cavo USB in dotazione all'alimentatore ed al connettore USB bianco sul lato destro del dispositivo. Collegate l'altra estremità dell'alimentatore ad una presa di corrente.



Batteria carica

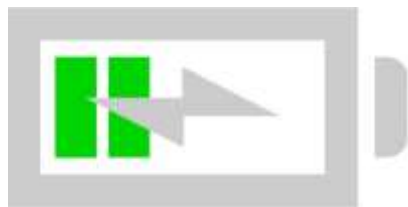

Batteria in carica



Livello batteria basso

La ricarica di Compact 6 HD dura circa 2 ore. Un Compact 6 HD completamente carico può funzionare per circa 3 ore, in base alle impostazioni di alimentazione. Per motivi di sicurezza, usate solo l'alimentatore ed il cavo USB in dotazione al Compact 6 HD per caricare la batteria.

Avviso sulla batteria

Compact 6 HD mostrerà brevemente un'icona ad avvisare che la batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata. Quando succede, assicuratevi di mettere sotto carica l'unità. Quando la batteria è completamente scarica, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Se Compact 6 HD non si accende, assicuratevi che sia carico.

Standby

Compact 6 HD potrebbe andare automaticamente in standby se non viene premuto nessun tasto o se non viene rilevato nessun movimento. Se premete il tasto ON/OFF (tasto arancione) lo riattiverete. Il tempo di standby può essere modificato o disabilitato nel menu di Compact 6 HD. Consultate il capitolo seguente per sapere come cambiare queste impostazioni.

5. Il menu di Compact 6 HD

Questo capitolo vi consentirà di famigliarizzare con il menu di Compact 6 HD.

Aprire e chiudere il menu

Per aprire il menu, scorrete con il dito dal bordo sinistro dello schermo verso destra. In alternativa, toccate lo schermo e successivamente l'icona della freccia sul lato sinistro dello schermo. In questo modo aprirete il menu principale. Per chiudere il menu, scorrete con il dito dal bordo destro dello schermo verso sinistra o toccate sulla freccia.



Menu principale

Il menu principale contiene due file di pulsanti ed uno o due slider, in base all'unità che avete: Compact 6 HD o 6 HD Speech. Per attivare un pulsante, toccatelo una volta. Per regolare il valore dello slider, toccatelo e tenete giù il dito mentre lo spostate a destra o a sinistra. Se attivate un pulsante aprirete una nuova schermata o un elenco. Per tornare al menu principale, toccate sulla freccia Indietro.

Il menu principale contiene le opzioni seguenti:

- Stato batteria
- Slider luminosità
- Salva
- Apri
- Voce (solo Compact 6 HD Speech)
- Slider velocità della voce (solo Compact 6 HD Speech)
- Impostazioni

Stato della batteria

Lo stato della batteria appare nell'angolo in alto a destra dello schermo. Se toccate sull'icona della batteria, si aprirà una nuova schermata che mostra l'icona ingrandita della batteria e lo stato di quest'ultima, il pulsante "Informazioni" e la "freccia Indietro" per tornare al menu principale. Il simbolo del fulmine indicherà che la batteria è in carica.

Informazioni

Toccate sul pulsante “Informazioni” nella schermata della batteria per vedere la versione dell'applicazione.

Regolazione della luminosità

Usate lo slider con l'icona con il Sole per aumentare o diminuire la luminosità dello schermo.

Salva


Per salvare un'immagine, aprite il menu e toccate sul pulsante “Salva”.

- Acquisite un oggetto con il pulsante Acquisisci
- Aprite il menu
- Premete il pulsante Salva per salvare l'oggetto
- Il menu verrà chiuso e sarà mostrata l'immagine acquisita

Se non c'è nessuna immagine da salvare, o se l'immagine è già stata salvata, il pulsante Salva sarà nascosto.

Apri

Per aprire un'acquisizione, aprite il menu e toccate sul pulsante “Apri”. Verrà mostrato un elenco con le miniature delle acquisizioni salvate, con le acquisizioni più recenti in cima all'elenco. Se sono presenti altre acquisizioni rispetto a quelle visibili a schermo, scorrete con il dito su e giù per scorrere l'elenco. Toccate sulla miniatura per aprire la relativa immagine.

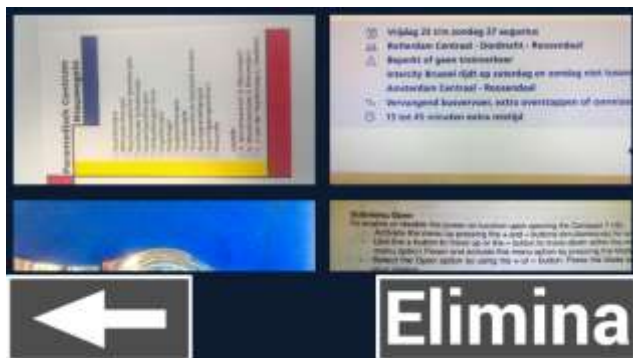

Apri per visualizzare le acquisizioni salvate



Elimina acquisizioni

Elimina

Per eliminare un'acquisizione, aprite il menu e toccate sul pulsante “Apri”. Nella schermata che si presenta, toccate sul pulsante “Elimina”. Verrà mostrato un elenco di miniature delle acquisizioni salvate, a partire da quelle salvate più recentemente. Ciascuna acquisizione ha una casella di controllo nell'angolo in alto a destra. Per selezionare un'acquisizione, attivate la casella. Toccate sul pulsante “Elimina” per eliminare le acquisizioni selezionate. Per eliminare tutte le acquisizioni, toccate sul pulsante “Elimina” senza selezionare un'acquisizione. Sarà chiesto di confermare l'eliminazione di tutte le acquisizioni. Per eliminare tutto, selezionate “Sì”. Per annullare l'operazione, selezionate “No”. In entrambi i casi ritornerete all'elenco delle acquisizioni. Toccate sulla “Freccia Indietro” per tornare alla schermata “Apri”. Toccate di nuovo sulla “Freccia Indietro” per tornare al menu principale.



Voci

Per selezionare delle voci o delle lingue, o la lingua del menu, per aggiungere e rimuovere una voce o una lingua, aprite il menu e toccate sul pulsante “Voci”.

Selezionare voci, lingue e la lingua del menu

Questo elemento vi permette di selezionare la voce e la lingua di lettura. Per selezionare un'altra voce per la lettura, toccate sull'icona Voci nell'angolo in alto a sinistra del menu principale per aprire l'elenco con le voci preselezionate. Ciascuna voce rappresenta una lingua. Toccate su una voce per selezionarla. Se la regolazione di una voce in lettura comporta una modifica della lingua, i menu passeranno automaticamente a quella lingua.



Voci e lingue di lettura

Aggiungere o rimuovere voci o lingue

Per aggiungere o rimuovere una voce o una lingua, toccate sull'icona Voci nell'angolo in alto a sinistra del menu principale. Nell'elenco con le voci preselezionate, toccate sul pulsante "Aggiungi/Rimuovi". Per aggiungere o rimuovere una voce per la lettura, selezionate la lingua dall'elenco toccando sulla lingua desiderata. In questo modo visualizzerete l'elenco delle voci disponibili per la lingua selezionata. Per abilitare una voce di lettura, selezionatela dall'elenco tramite tocco. Un segno di spunta davanti al nome della voce indicherà che è abilitata. Quando la voce è abilitata, sarà disponibile sotto il pulsante "Voci" nel menu principale. Deselezionando una voce, quest'ultima verrà rimossa dalle voci di lettura disponibili. Le lingue da cui viene selezionata una voce appariranno nella parte superiore, e saranno contrassegnate con un segno di spunta.



Velocità della voce

Usate lo slider con l'icona a forma di punta di freccia per regolare la velocità di riproduzione della voce.

Impostazioni

Toccate sul pulsante “Impostazioni” per accedere al relativo menu. Il pulsante “Impostazioni” è il pulsante con l'icona a forma di rotellina al fianco dell'icona della batteria. Il menu Impostazioni contiene quattro pulsanti:

- Righe
- Bluetooth
- Colori
- Altro...



menu Impostazioni

Righe attivato / disattivato

Compact 6 HD può visualizzare una riga di lettura per aiutarvi a posizionare Compact 6 HD correttamente sul documento. Per abilitare la riga di lettura, toccate sul pulsante “Righe”. Toccate ancora su questo pulsante per nasconderla.

Bluetooth: collegare un altoparlante o delle cuffie Bluetooth


Per collegare un altoparlante o delle cuffie Bluetooth, toccate il pulsante “Bluetooth” ed attivate il Bluetooth.



Sarà visualizzato un elenco dei dispositivi associati.

Se non è stato associato nessun altoparlante o delle cuffie, toccate sul pulsante "Cerca" per individuare i dispositivi disponibili. Prima di avviare la ricerca Bluetooth, assicuratevi che l'altoparlante o le cuffie siano accesi e che siano individuabili. Consultate il manuale dell'altoparlante o delle cuffie per sapere come attivare la modalità di abbinamento Bluetooth. Per associare l'altoparlante o le cuffie, toccate sul nome del dispositivo e, se serve, digitate il codice pin. Consultate il manuale dell'altoparlante o delle cuffie per sapere il codice pin del dispositivo.

Una volta associato il dispositivo, per collegarlo toccate sul nome. Vi sarà chiesto di collegarvi o di ignorare il dispositivo. Toccate il pulsante "Connetti" per effettuare la connessione.

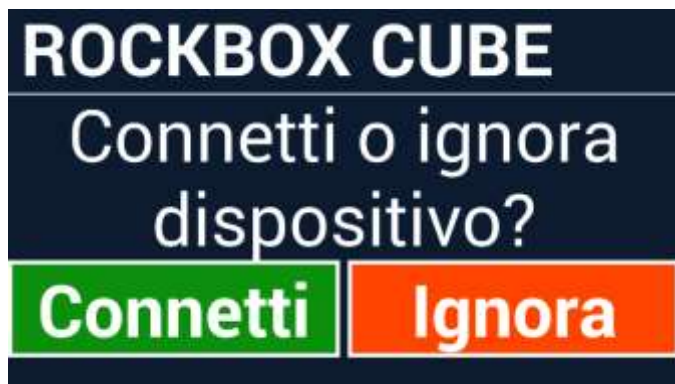

Ad indicare che un dispositivo è collegato, ci sarà un segno di spunta a fianco del nome del dispositivo e quest'ultimo sarà evidenziato in blu. Per dissociare / ignorare un dispositivo, toccate sul pulsante "Ignora". Il dispositivo verrà rimosso dall'elenco dei dispositivi accoppiati.

Nota: Sono supportati solo altoparlanti o cuffie compatibili con Bluetooth versione 4.0 o superiore.

Colori

Nel menù Impostazioni, toccate sul pulsante “Colori” per selezionare i colori a contrasto elevato desiderati.



Menu Colori

Compact 6 HD supporta quattro modalità a contrasto elevato. Per ciascuna di queste quattro modalità, possono essere selezionati i colori di scritte e sfondo. Possono essere disabilitate tre modalità a contrasto elevato, una tuttavia è obbligatoria.

Per cambiare i colori di scritte e sfondo:

1. Toccate sul numero della modalità che volete modificare. Ciascun numero rappresenta una modalità.
2. Per selezionare nuovi colori a contrasto elevato per le scritte e lo sfondo, toccate sulla freccia su per spostarvi su o sulla freccia giù per andare giù nell'elenco delle combinazioni di colore.
3. Le modalità a contrasto elevato 2, 3 e 4 possono essere disabilitate selezionando il simbolo "X".
4. Toccate sul pulsante "Indietro" per tornare al menu Impostazioni.

Altro...

Il menu "Altro..." contiene le seguenti impostazioni:

- Luce lettura
- Luce estesa
- Disattiva audio
- Vibrazione
- Alterna telecamere
- Posizione riga
- Standby
- Barra pulsanti
- Stativo chiuso
- Ripristina



Menu Altro...

Luce lettura

Questa opzione consente di abilitare o disabilitare le luci – posizionate a sinistra e a destra della telecamera di lettura. Per default le luci in lettura sono abilitate per avere la miglior qualità possibile per l'immagine.

Luce estesa

Questa opzione consente di abilitare o disabilitare la luce – posizionata al fianco della telecamera panoramica. Per default la luce estesa è disabilitata.

Disattiva audio

Questa opzione consente di attivare o disattivare i riscontri sonori. Per default l'audio è abilitato.

Vibrazione

Questa opzione consente di attivare o disattivare la vibrazione. Per default la vibrazione è attivata.

Alterna telecamere

Se “Alterna telecamere” è attivato, l'apertura dello stativo attiverà automaticamente la telecamera per la lettura. Se Compact 6 HD viene acceso a stativo chiuso, sarà attivata la telecamera panoramica. Per disattivare “Alterna telecamere”, la telecamera attiva dovrà essere selezionata manualmente. Per default, “Alterna telecamere” è attivato.

Posizione riga

Questo elemento del menu consente di cambiare la posizione della riga di lettura tra sei posizioni: in alto orizzontale, al centro orizzontale, in basso orizzontale, verticale a sinistra, verticale al centro, verticale a destra. Per default, la riga di lettura è impostata al centro dello schermo.

Standby

Il tempo di standby imposta dopo quanto va in standby Compact 6 HD per risparmiare energia. Premendo un tasto qualsiasi riattiverete l'apparecchio dallo standby. Per default lo standby è impostato su 10 minuti di inutilizzo, in pratica per dieci minuti non viene premuto nessun pulsante e non viene rilevato nessuno spostamento del Compact 6 HD.

Barra pulsanti

Questa opzione consente di cambiare la posizione della barra dei pulsanti tra: automatico, in basso o laterale. In base alla scelta, potrete cambiare la posizione della barra dei pulsanti in basso o a lato dello schermo.

L'impostazione predefinita è "Automatico". Quando è impostata su "Automatico", la posizione della barra dipenderà dall'accessorio in uso. Con lo stativo di lettura, ad esempio, la barra verrà posizionata in basso.

Stativo chiuso

Se l'opzione Stativo chiuso è impostata su Standby, Compact 6 HD andrà in standby quando chiuderete lo stativo. Se l'opzione è impostata su Panoramica e Alterna telecamere è impostato su Attivato, la chiusura dello stativo attiverà automaticamente la telecamera panoramica.

Ripristina

Toccate su questa opzione se volete ripristinare le impostazioni predefinite. Sarà chiesta una conferma per proseguire. Per ripristinare le impostazioni selezionate "Sì". Per annullare l'operazione, selezionare "No".

Appendice A: Informazioni tecniche

Ingrandimento	1.8x - 18x (con stativo) 0.5x - 21x (senza stativo)
Modalità di visualizzazione	Modalità fotografica a colori reali Contrasto elevato, bianco su nero Contrasto elevato, nero su bianco Combinazione 1 a contrasto elevato Combinazione 2 a contrasto elevato
Messa a fuoco	Auto-focus
Rapporto contrasto	700:1
Luminosità	350 cd/m ²
Schermo	5.94" TFT
Risoluzione schermo	1280 x 720
Dimensioni	183 x 95 x 14 mm
Peso di Compact 6 HD	270 grammi
Peso stativo	110 grammi
Batteria	Uso medio, 3 ore. Tempo di ricarica medio, 2 ore
Batteria polimeri di litio	Ricaricabile, 3.7V 2600mAH
Tipo di alimentatore	Intertek, MX15Z-0502500VU
Input	100-240V, 50-60Hz, 0.4A
Output	DC5V-2.5A

Condizioni operative

Temperatura	da +10°C a 35°C
Umidità	< 70%, in assenza di condensa
Altitudine	fino a 3000 m
Pressione	700 – 1060 hPa

Condizioni di stoccaggio e di trasporto

Temperatura	da +10°C a 40°C
Umidità	< 95%, in assenza di condensa
Altitudine	fino a 12192 m
Pressione	186 – 1060 hPa

Appendice B: Sicurezza

Uso previsto:

Compact 6 HD è stato progettato in modo che possa essere usato in ambiente ospedaliero per scopi generici, come ad esempio la lettura di tabelle cliniche. Compact 6 HD non può essere usato per procedure chirurgiche in combinazione con sistemi di supporto vitale.

Attenzione: decisioni diagnostiche critiche non devono basarsi su immagini visualizzate da questo dispositivo.

- Non esporre Compact 6 HD a fonti di calore eccessive o direttamente alla luce del sole per evitare il rischio di incendio.
- Non rimuovere nessun componente di Compact 6 HD. Contattare un centro servizi autorizzato da Optelec nella vostra zona.
- Per evitare rischi da danni elettrici, tenere Compact 6 HD lontano da liquidi e sostanze chimiche.
- Trattare Compact 6 HD con cura. Un uso scorretto può danneggiare i componenti interni.
- Non usare Compact 6 HD vicino a dispositivi medici schermati inadeguatamente.
- Non provare ad aprire il vano batteria o non provare a rimuoverla.
- Contattare il proprio rivenditore per assistenza se necessario. **Non smontare l'unità** per non perdere la garanzia.
- Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo sempre dalla corrente e spegnerlo. Usare un panno morbido asciutto per pulirlo. Non usare agenti chimici, saponi o materiali abrasivi poiché potrebbero danneggiare l'unità.

L'uso di Compact 6 HD in modo diverso da quanto descritto in questo manuale invaliderà la garanzia.

Appendice C: Garanzia

Optelec garantisce Compact 6 HD, con decorrenza dalla data di consegna, come esente da difetti di materiale e di fabbricazione.

La garanzia non è trasferibile ed applicabile a gruppi e multi-utenti. Compact 6 HD è stato progettato per l'utente singolo, per essere utilizzato in ambienti chiusi o all'aperto. Optelec si riserva il diritto di riparare o sostituire qualsiasi Compact 6 HD acquistato con un prodotto simile o migliore.

In nessun caso Optelec o i suoi fornitori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni indiretti o consequenziali. Le eventuali azioni risolutive si limiteranno alla sostituzione di Compact 6 HD. Questa garanzia è da ritenersi valida solo se applicate nel paese di acquisto, e a condizione che i sigilli siano intatti. Per ulteriori diritti di garanzia o di assistenza durante o dopo il periodo di garanzia, si prega di contattare il proprio distributore Optelec.

Optelec non si assume alcuna responsabilità per un uso diverso da quello descritto nel manuale di questo dispositivo. L'uso di Compact 6 HD in modo non aderente a quanto descritto in questo manuale, farà decadere la garanzia.

L'affidabilità della messa a terra si ottiene solo quando l'alimentatore di Compact 6 HD viene collegato ad una presa di pari certificazione.

Attenzione – non modificare questa fornitura senza l'autorizzazione del produttore.

Attenzione – per evitare il rischio di scariche elettriche, questo apparecchio deve essere collegato solo ad una presa con messa a terra.

Attenzione: l'alimentatore in dotazione è parte del prodotto Compact 6 HD.



Attenzione, consultare la documentazione in dotazione.



Seguire le istruzioni operative o consultare le istruzioni per l'uso del prodotto.



STAND-BY.



Corrente diretta.

Direttiva RoHS

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 03 gennaio 2013, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e loro modifiche.

Direttiva Comunità Europea

I prodotti con marchio CE sono conformi alla Direttiva EMC (2014/30/EU), alla Direttiva MDD (93/42/EEC) ed alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU) emesse dalla Commissione della Comunità Europea.

Attenzione: L'uso di accessori, trasduttori e cavi, con l'eccezione di trasduttori e cavi venduti dal produttore di Compact 6 HD come parti di ricambio per i componenti, possono causare aumento o riduzione dell'immunità di Compact 6 HD.



Questo dispositivo ha marchio CE e FCC

Comunicato della Commissione Comunicazioni Federali (FCC):

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono indicati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo apparecchio causasse interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia

all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV.

Attenzione: Si avvisa che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare il permesso di usare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero compromettere il funzionamento.

Attenzione: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non idoneo. Si prega di smaltire le batterie usate secondo le norme di smaltimento e riciclaggio che sono in vigore nel proprio paese o regione.

Contact – Optelec Offices Worldwide

Optelec Europe

Breslau 4
2993 LT Barendrecht
The Netherlands
T: +31 (0)88 678 3444
www.optelec.com

Optelec Canada

1832 Marie-Victorin
Longueuil, QC J4G 1Y9
Canada
T: +1 (450) 677-1171
www.optelec.com

Optelec Limited

Unit H1,
Penfold Trading Estate,
Imperial Way,
Watford WD24 4YY,
United Kingdom
T: +44 1923 23 13 13
www.optelec.co.uk

Optelec U.S.

11800 31st Court North
St. Petersburg, FL 33716
U.S.A.
T: +1 (800) 444-4443
www.optelec.com

Optelec Nederland BV

Breslau 4
2993 LT Barendrecht
The Netherlands
T: +31 (0)88 678 3555
www.optelec.nl

Optelec NV

Baron Ruzettelaan 29
8310 Brugge
Belgium
T: +32 (0)50 35 75 55
www.optelec.be

Optelec GmbH

Fritzlarer Strasse 25
34613 Schwalmstadt
Germany
T: +49 669 196 170
www.optelec.de

The logo for Optelec features the word "Optelec" in a dark blue, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a blue arc above it and a blue arc below it. The letter "e" is also stylized with a blue arc above it. The background of the slide consists of several overlapping, semi-transparent light blue curved shapes on a white background.

Optelec